

PRISMA

GUIDA ALL'UTILIZZO



**ASCOLTA IL TUO CORPO.
ANTICIPA CIO CHE NON DICE ANCORA.**

INIZIA ORA IN 5 SEMPLICI PASSAGGI



Scansiona il QR code e **scarica l'app PRISMA** sul tuo smartphone.



Crea il tuo account. Apri l'app e registrati in pochi semplici passaggi.



Accedi all'app e **ricerca il tuo dispositivo** wearable.



Associa e avvia. Collega il dispositivo al tuo account e clicca su "Avvia Connessione"



Attendi dopo 12 ore riceverai le prime previsioni.

**ASCOLTA IL TUO CORPO.
INTERPRETA I SUOI SEGNALI.**

PRISMA integra tecnologia e monitoraggio continuo per supportare la prevenzione e il benessere quotidiano.

PRISMA

**ASCOLTA IL TUO CORPO.
ANTICIPA CIÒ CHE NON DICE ANCORA.**

PRISMA è un'app di monitoraggio continuo che consente di raccogliere e analizzare in modo semplice e automatizzato i principali parametri vitali.

Attraverso un dispositivo indossabile, PRISMA registra dati come frequenza cardiaca, pressione arteriosa e saturazione di ossigeno (SpO_2), inviandoli a una piattaforma di analisi basata su algoritmi di intelligenza artificiale.

Il sistema **elabora le informazioni nel tempo per stimare il rischio di eventuali peggioramenti delle condizioni di salute**, con particolare attenzione ai pazienti con multimorbilità.



PRISMA fornisce stime personalizzate del rischio, **invia notifiche in caso di superamento delle soglie** e mette a disposizione una dashboard intuitiva per consultare i propri dati, *favorendo un monitoraggio consapevole e continuo della salute.*

INIZIA ORA IN 5 SEMPLICI PASSAGGI



Scansiona il QR code e **scarica l'app PRISMA** sul tuo smartphone.



Crea il tuo account. Apri l'app e registrati in pochi semplici passaggi.



Accedi all'app e **ricerca il tuo dispositivo** wearable.



Associa e avvia. Collega il dispositivo al tuo account e clicca su "Avvia Connessione"



Attendi dopo 12 ore riceverai le prime previsioni.

COME INTERPRETARE I RISULTATI

PRISMA analizza i dati raccolti nel tempo e fornisce una stima personalizzata del livello di rischio.

Dashboard

Nella dashboard è possibile consultare:
Le **misurazioni** aggiornate di ora in ora.

Le **previsioni**, che si dividono in:

● Basso

Parametri stabili.

● Moderato

Alcune variazioni da monitorare.


● Elevato

Valori oltre le soglie definite.

Si consiglia un confronto con il medico.

Gli **Avvisi**

In caso di superamento delle soglie di attenzione, PRISMA invia una notifica per segnalare il livello di rischio elevato.

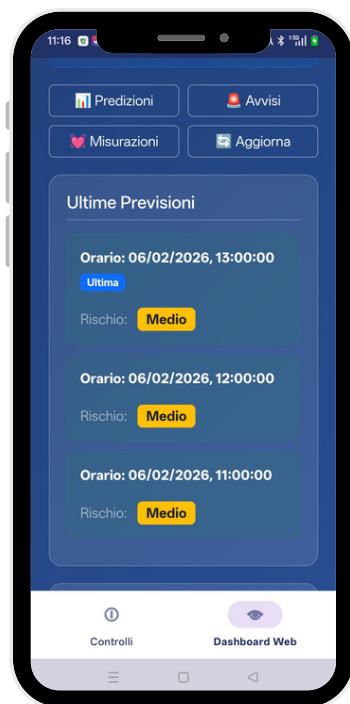

*Ricorda: **PRISMA** supporta il monitoraggio ma non
sostituisce la valutazione clinica.*

AVVERTENZE

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA

La pressione arteriosa rilevata dal dispositivo indossabile è stimata tramite sensori posizionati al polso.

A differenza dei dispositivi tradizionali a bracciale, il wearable non utilizza un sistema di compressione del braccio. Per questo motivo, i valori rilevati possono differire da quelli ottenuti con altri strumenti di misurazione.

STATO DELLA BATTERIA E CONTINUITÀ DEL MONITORAGGIO

Per garantire una corretta acquisizione dei dati è necessario:

- assicurarsi che non siano attive limitazioni energetiche che impediscano all'app di funzionare correttamente, anche in modalità standby
- controllare che la connessione tra dispositivo e app sia attiva

Uno stato di batteria insufficiente o eventuali interruzioni di connessione possono influire sulla continuità del monitoraggio.

IN CASO DI SINTOMI

In presenza di sintomi rilevanti o di un peggioramento delle condizioni di salute, contattare tempestivamente il proprio medico o i servizi sanitari di riferimento.

ASSISTENZA GRATUITA

Per qualsiasi problema tecnico o difficoltà nell'utilizzo dell'applicazione, è possibile contattare il nostro servizio di supporto all'indirizzo email:

assistenza@deltabiotech.it

al numero di telefono:

08241984651

oppure al seguente link:



Il nostro team è a disposizione per fornire tutto il supporto necessario.



PRISMA è il tuo nuovo alleato per il benessere.

Un sistema intelligente, sicuro e sviluppato da Delta Biotech, azienda impegnata nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni avanzate per la salute e il monitoraggio digitale.

Ogni dettaglio del progetto nasce dall'esperienza e dalla passione per l'innovazione scientifica, con un unico obiettivo: rendere la tecnologia uno strumento di prevenzione reale, quotidiano e alla portata di tutti.



DELTABIOTECH SRL

P.I.: 01763410626

SEDE OPERATIVA: S. S. Appia zona PIP – 82030 Apollosa (BN)

SEDE LEGALE: Via delle Puglie, 47 – 82100 Benevento

Aderente al contratto di rete Biotech Network

Telefono: 0824 1984651

Email: info@deltabiotech.it / deltabiotech@pec.it

PRISMA

ASCOLTA IL TUO CORPO.

ANTICIPA CIÒ CHE NON DICE ANCORA.

SCANNERIZZA IL QR CODE E SCARICA L'APP



LEGGI LA GUIDA ALL'UTILIZZO E SCOPRI
COME UTILIZZARE **PRISMA**

*Ricorda: **PRISMA** supporta il monitoraggio ma non
sostituisce la valutazione clinica.*

